



Intima Gel

®

bioVag

SPECJALISTYCZNY KREMO-ŻEL DLA KOBIEĆ, KTÓRY WSPOMAGA LECZENIE INFEKCJI I SUCHOŚCI OKOLIC INTYMNYCH, WSPIERA UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO PH OKOLIC INTYMNYCH

Opis bioVag™ Intima Gel

Głównym składnikiem aktywnym kremu-żelu **bioVag™** jest **BioFemme®**, stanowiący postbiotyki z bakterii kwasu mlekowego m.in. *Lactobacillus plantarum* oraz *Lactobacillus reuteri*.

BioFemme® zawiera głównie kwasy organiczne oraz dipeptydy, które są znane i opisane jako związki o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym; wspomagają tworzenie optymalnych warunków rozwoju mikroflory, a zatem wpływają korzystnie na utrzymanie naturalnego, kwaśnego pH okolic intymnych. Mechanizm działania postbiotyków obejmuje hamowanie namnażania się bakterii i grzybów patogennych oraz blokowanie powstawania biofilmu bakteryjnego na powierzchni okolic intymnych. W przypadku postbiotyków bakterii kwasu mlekowego znaczące jest tworzenie fizycznej bariery w stosunku do patogenów bakteryjnych i grzybowych przez unikalne kwasy organiczne.

Prawidłowa kondycja mikrobiomu okolic intymnych hamuje nadmierny wzrost patogennych bakterii i grzybów wywołujących stany zapalne w tym *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* i *Staphylococcus aureus*.

Preparat hamuje rozwój grzybów *Candida albicans* oraz bakterii *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* i *Staphylococcus aureus* już po około 8 godzinach od podania (badania własne producenta).

Wspomaga procesy regeneracji błony śluzowej, działa nawilżająco oraz łagodzi objawy swędzenia i pieczenia okolic intymnych. Produkt zawiera znaczne ilości wolnych aminokwasów.

bioVag™ przyczynia się do utrzymania równowagi mikroflory bakteryjnej okolic intymnych.

Kiedy należy stosować kremo-żel bioVag™?

Unikalna formuła wyrobu medycznego **bioVag™** polecana jest w przypadku:

- nawracających infekcji oraz suchości okolic intymnych,
- pieczenia, podrażnień, świądu i dyskomfortu związanych ze stanem zapalnym okolic intymnych,
- zaburzeń odczynu pH okolic intymnych,
- kobiet, które prowadzą aktywny tryb życia.

Sposób użycia:

Przed użyciem wyrobu medycznego **bioVag™** należy dokładnie umyć ręce. W celu zastosowania kremo-żelu należy wyjąć aplikator z ochronnej folii i zdjąć różową osłonkę aplikatora. Następnie przy użyciu tłoczka wycisnąć zawartość aplikatora w całości w miejsce podania. Zaleca się stosowanie kremo-żelu na noc. Kremo-żel ma kolor od beżowego do brązowego i jest on wynikiem użytych surowców.

Przeciwwskazania:

Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremo-żelu. W przypadku niepełnosprawności należy poprosić o pomoc drugą osobę np. członka rodziny. Nie stosować w przypadku uszkodzenia aplikatora.

Środki ostrożności:

Aplikator przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Przed aplikacją zaleca się wyjęcie tamponu higienicznego. Po użyciu aplikator należy wyrzucić. Nie stosować jeśli upłynął termin ważności. W czasie ciąży i karmienia piersią wyrób stosuj po konsultacji z lekarzem. Jakiegokolwiek niepokojące objawy związane z wyrobem należy zgłosić producentowi.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Skład kremo-żelu bioVag™

BioFemme®, kwas hialuronowy, tokoferol, olej słonecznikowy, ekstrakt z cykorii *Cicchorium Intybus*, regulator kwasowości, woda, stearynian poliglicerolu, stearynian glicerolu, gliceryna, guma ksantanowa, krzemian magnezowo - glinowy, E211, E202.

Postać oraz opakowanie:

Opakowanie zawiera jeden jednorazowy aplikator o pojemności 5 ml oraz ulotkę informacyjną.

Wyłączny dystrybutor:

biofema®

ul. Wólczyńska 234,
01-919 Warszawa
jakosc@bioticom.pl

data opracowania/aktualizacji: 08/2023

BIOTICOM
Stefan Koziorowski

ul. Bytomska 11, 01-612 Warszawa

5ml



producent



zajrzyj do instrukcji używania



oznakowanie dopuszczalnej temperatury przechowywania



Nr serii



do jednorazowego użytku



znak zgodności CE



wyrób medyczny



użyć do